



Suma Med Super Plus

L8

Geconcentreerde bedpanspoelreiniger

Omschrijving

Suma Med Super Plus is een licht gekleurd vloeibare reiniger voor de reiniging van bedpannen in automatische bedpanspoel machines.

Eigenschappen

Suma Med Super Plus is een vloeibare reiniger speciaal ontwikkeld voor het gebruik in automatische bedpanspoel machines. Het product bevat alkalische en kalkbindende ingrediënten voor uitstekende reinigingsresultaten. Zelfs in hard water wordt kalkaanslag in de bedpannen en de machine voorkomen. Een speciale corrosie inhibitor beschermt de zachte metalen onderdelen in de machine.


Voordelen

- Effectieve reiniging van bedpannen
- Voorkomt kalkaanslag op de bedpannen en de machine
- Sterk geconcentreerd product en daardoor zuinig in gebruik
- Veilig voor de zachte metalen onderdelen van de machine zoals koper en messing

Gebruiksaanwijzing

Suma Med Super Plus wordt standaard gebruik in combinatie met Diversey automatische doseerapparatuur of de apparatuur zoals meegeleverd met de machine. De aanbevolen dosering is 1-5 gram per liter water, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

CE

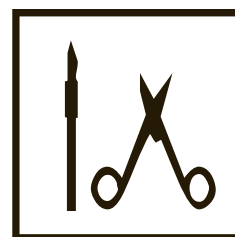

° A.I.S.E.

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*



Suma Med Super Plus

L8

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Licht gekleurd

pH (1% oplossing): 10.6

Relatieve dichtheid (20°C): 1.28

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Med Super Plus geschikt voor gebruik op de meeste, in bedpanspoelen voorkomende, materialen.

Goedkeuringen

Voorzien van CE-markering conform de richtlijn 93/42/ewg voor medische producten.