



Diversey™

# Oxivir Excel Wipe CE

## Breed spectrum reinigings- en desinfectiedoekjes voor niet-invasieve medische hulpmiddelen (Class IIa)

### Omschrijving

De Oxivir Excel Wipe CE is een gebruiksklare, één steps reiniger en desinfecterend doekje, met een korte contacttijd. Gebaseerd op Diversey's gepatenteerde waterstofperoxide formulering, Oxivir Excel Wipe CE kan gebruikt worden op niet-invasieve medische hulpmiddelen (Class IIa).

### Eigenschappen

- Bacterie-, virus- en gistdodend
- Effectieve reiniger
- Desinfecteert in één minuut
- Gebruiksvriendelijk en veilig
- Gemakkelijk in gebruik, vereist geen voorbereiding en hoeft niet naar de wasserij
- Geurloos
- De actieve stof wordt afgebroken in water en zuurstof
- Naspoeien niet nodig

### Voordelen


- De brede effectiviteit geeft het hoogste niveau voor patiënt bescherming
- Uitgebreid getest op Europese normen en effectief tegen meerdere belangrijke pathogene, het product heeft een volledig virus claim, inclusief het Poliovirus, Adenovirus, en Murine Norovirus. Het product wordt beschouwd als effectief tegen alle enveloped virussen zoals; HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus en Coronavirus
- Korte contacttijden zorgen ervoor dat het oppervlak vochtig kan blijven om het desinfecteren te kunnen garanderen
- Uitstekende reinigende werking
- Veilig voor gebruik bij patiënten, bezoekers, niet irriterend voor ogen en de huid
- AHP formulering is mild voor oppervlaktes en verlengt de levensduur van het materiaal
- Geschikt voor gebruik in hoog risico gebieden zoals Gezondheidszorg inclusief de OK, IC, Neonatologie en patiëntenkamers Niet bedoeld voor gebruik op invasieve medische hulpmiddelen

### Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder grove vervuiling.
2. Open de verpakking van de doekjes, haal er één doekje uit en sluit de verpakking.
3. Veeg over het materiaal en zorg dat het gehele oppervlak vochtig wordt, laat aan de lucht drogen.
4. Zorg ervoor dat het materiaal vochtig blijft voor de duur van de contacttijd.
5. Vervang het doekje als het materiaal of oppervlak niet meer vochtig wordt, het visueel vervuild is of als er een andere ruimte gereinigd gaat worden.



Diversey Europe  
Operations B.V.  
Maarssebroeksedijk 2,  
3542 DN Utrecht,  
The Netherlands

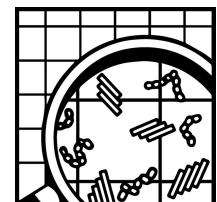

© A.I.S.E

The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a blue oval shape with a stylized leaf icon to the right.

Diversey<sup>TM</sup>

# Oxivir Excel Wipe CE

## Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Polypropyleen doekje  
Geur: Neutraal  
pH-waarde (in gebruik): 1.95  
Relatieve dichtheid (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.00

*Bovenaangegeven gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.*

## Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

## Productcompatibiliteit

Niet mengen met andere producten. Gebruik niet op water- of zuurgevoelige oppervlakken. Onder de geadviseerde gebruikers condities, is Diversey Oxivir Excel Wipe CE geschikt voor gebruik op de meeste voorkomende materialen.

## Microbiologische gegevens

Microbiologische gegevens Effectiviteit is bewezen in vuile condities in compliance met: EN13727, EN13624, EN14476 en EN16615.

## Werking / Contacttijd

Bacteriedodend RTU 1 min

Virusdodend RTU 30 sec

Gistdodend RTU 5 min

## Beschikbare verpakkingsoorten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
101104773	DI Oxivir ExcelWipeCE FLW 24x100pc W4058	Wipes
101104910	DI Oxivir Excel Wipe CE 6x160pc W4058	Wipes

[www.diverse.com](http://www.diverse.com)

© 2022 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 14/12/2022 nl-NL (K00248)